

これまでの培ったノウハウと多くの医師、看護師、救命救急士の皆さまの声を活かして開発しています



病院内での新人看護師トレーニングや救命救急士の訓練で実際に活用される様子。  
(写真中の商品は開発中の試用時のものも含まれます)

血液の充填や回収に 30 秒もかからなかった。  
(教官:職歴20年)

針先が見えるので、突き抜けてしまう  
自分の癖がわかる。  
(訪問看護師:職歴20年)

模擬血管の細さが本当の血管みたい。  
(新人看護師)

新人看護師研修にはいつも使わせて  
いただいています。  
(K病院新人研修担当看護師)

静脈内留置針ができなくて悩んでました。  
一人で練習できて良い。  
(看護師:職歴23年)

腕に貼れて患者様の体験ができるのがいい。  
(看護大学教官)

静脈内留置針の実践を始めて学ぶ時、透明版を  
使って成功体験できていれば良かった(救命救急士)

質感が人体に似て、血管に入った感じがわかる。  
(医師:職歴30年)



特許第 5870349 号

注トレくん® III 予定販売価格 25,000円  
(送料込、消費税別)

<製品内容>①末梢静脈注射練習シート「注トレくんIII」(本体) 内蔵  
内容:模擬血管3本・接続部品3個(キャップ付)、針突抜防止内蔵プレート  
②針突抜防止板(白)…1枚 ③腕巻き補助バンド ベージュ(ゴム製)…1本  
④腕巻き補助バンド 白(マジックテープ)…1本 ⑤「左肘窩図解」台紙…1枚  
⑥模擬血液・点滴受水バッグ(キャップ付)…一式 ⑦吸水シート…1枚  
⑧専用収納ケース…1袋 ⑨取扱説明書 ⑩参考資料

<サイズ>本体シート/(最大)縦 125×横 70×厚み 10 mm、携帯ケース/  
縦 160×横 210×厚み 15 mm <総重量>約 500g  
<材質>本体/ポリウレタン・シリコンチューブ・ポリエチレンプレート

★本体素材はベージュ版・透明版から選択。  
※模擬血液染料は別売です。

■製品企画・販売元



ナースの現場で必要なものを。アイデアから形へ  
株式会社ナースあい 〒650-0016 神戸市中央区橋通1丁目2番14号 浅見ビル1階  
TEL 078-599-7644 FAX 078-599-7645

©「注トレくん」は、ナースあいの登録商標です。©受注生産品につき、在庫切れの場合はご容赦ください。※仕様やデザインは予告なく変更する場合があります。

<https://chutrakun.com> 注トレくん 検索

採血、静注、  
点滴の練習が  
できる

準備、  
片付けが  
簡単!

一人でも  
二人でも  
練習できる

リアルな感触!! 採血・静注・点滴もできる!  
血管3タイプ「末梢静脈注射」練習シート

注トレくん® III

特許第 5870349 号



※模擬血液染料は別売です。



ベージュ版、透明版の  
2タイプからお選びいただけます。



医師・臨床検査技師に



救急救命の現場に



看護教育の現場に



新人ナースに

ナースの現場で必要なものを。アイデアから形へ ナースあい

# 現場での実践を重視して、末梢静脈注射の練習に必要なリアルさを追求しました



模擬血液を充填した模擬血液・点滴受水バッグを接続して、よりリアルな状況で練習が可能です。ページ版の本体を使用すれば触診で血管を探しながら、透明版なら針先を見ながら練習ができます。



翼状針の穿刺だけではなく、実際に点滴液(練習には水などを活用)を使った点滴や静脈注射の練習ができます。そのため翼状針の人体(注トレくん本体)への固定や抜去までを含めたリアルな練習も可能です。



模擬血液バッグを利用してリアルなバックフローを再現しています。刺す感覚だけではなく、血液の逆流を体験することで、より実践に近いイメージを持って留置針の穿刺や留置の練習ができます。

## 1人でも練習できる! (本体シートを机に貼って)



### 【本体シートのみで使用】

模擬血液・点滴受水バッグを接続せず、机などに本体のみを貼り付けて1人で手技の練習をすることが可能です。血管に上手く入れれば空気が引けます。



### 【模擬血液を使って練習可能】


模擬血液・点滴受水バッグに模擬血液を充填して使うことができます。別売のインクを活用すれば、見た目もリアルで、より実践に近い感覚で練習ができます。



### 【刺入角度もチェックできる】

専用台紙ウラ面の「刺入角度チェックコーナー」を参照して正しい刺入角度を練習することができます。

## ■本体シート(配置イメージ図)

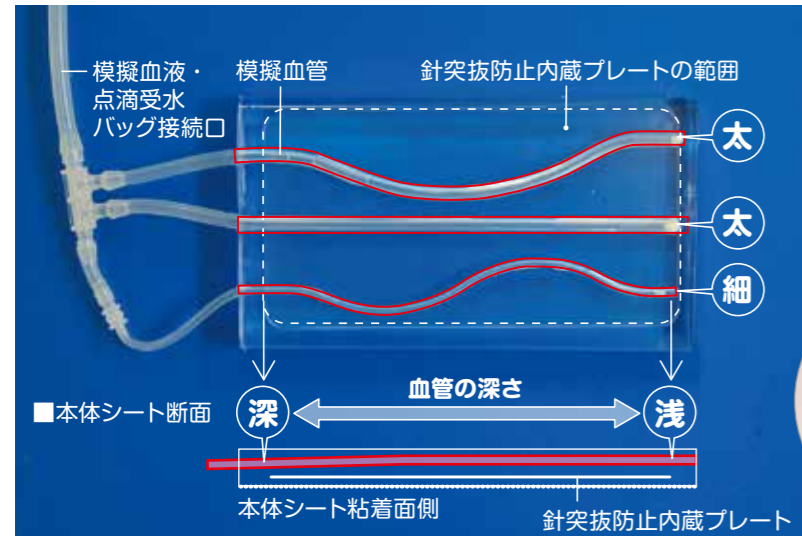

※模擬血管の線画はイメージで、本体シートごとに血管の位置は微妙に異なります。※写真は透明版です。

### 【注トレくんⅢ本体について】

模擬血管 直・蛇行(太)・蛇行(細)への穿刺の練習ができるシートです。一人でも二人でも練習ができ、模擬血液を使ったよりリアルな練習も可能です。



### 触診の練習にも!

本体シートにはポリウレタン樹脂を使用しているため、弾力があり、血管の触診練習にもお役に立てます。

### 【安全性にも配慮】



本体に針突抜防止用にプレートを内蔵していますが、安全対策のため本体シートの裏面(粘着面)にも針突抜防止シートを別途装着して練習をおこないます。

### 【すぐだけで粘着力回復】



本体シート裏面の粘着部分に汚れが付くなどして粘着性が低下したときは、水が湯ですすぎ洗うだけで粘着性が戻ります。粘着面は自然乾燥させてください。

### 【準備・片付けも簡単お手軽】



必要備品全てが、専用ポーチに収まる手軽さで、準備も片付けも簡単にできます。頻回な練習もスムーズにおこなえます。

※この商品は、末梢静脈注射の認められた医療者・救急救命士とその学生のための技術習得を目的とした練習ツールです。また、医行為を保証するものではありません。十分ご理解の上ご使用ください。\*本体シートは模型であり血管は簡略化しています。実際の人体と模擬血管の配置や、模擬血管・皮膚の硬さや状態等は異なりますのでご了承ください。\*製品の性質上、穿刺練習により本体製品に針の刺し跡が残ります。本製品は頻回な練習用教材を目的として開発した消耗品のため、穿刺練習の方法によっては使用回数、耐久性に差が生じます。そのことをあらかじめご理解の上、ご活用ください。\*「左肘窩図解」台紙は、人体の左の肘窩の静脈やその周辺の神経・動脈をイメージしており、実際とは異なります。\*注射針を使用した練習は、注射針の使用の許可が必要です。各所属の教育担当者様、施設管理者様への確認の下、ご使用ください。\*手袋、注射針、注射器、駆血帯は商品に含まれません。